

# ACCU-CHEK<sup>®</sup> Smart Pix

## Meer inzicht - eenvoudiger kan niet

1



### Aansluiten en opstarten

- Verbind de USB-stekker van de Accu-Chek Smart Pix met een vrije USB-poort van uw computer. Uw computer herkent de Accu-Chek Smart Pix automatisch en zal een nieuw venster openen met de Accu-Chek Smart Pix bestanden.
- Dubbelklik op het bestand *START.htm* om het Accu-Chek Smart Pix programma te openen in een nieuw venster.

3



### Gegevens overbrengen

- Leg de Accu-Chek bloedglucosemeter of insulinepomp ca. 10 cm van het infraroodvenster van de Accu-Chek Smart Pix. Beide infraroodvensters moeten tegenover elkaar liggen.
- Klik nu op de optie *Apparaat zoeken* rechts bovenaan uw scherm. Start vervolgens het overbrengen van de gegevens zoals in de handleiding van uw Accu-Chek bloedglucosemeter of insulinepomp.
- De gegevens worden nu ontvangen door de Accu-Chek Smart Pix en na enkele seconden worden deze op het scherm van uw computer weergegeven.

2



### Instellingen

- Klik op *Instellingen* bovenaan het scherm. Met de opties in het menu aan de linkerkant kan u de weergave, de persoonlijke- en rapportage-opties instellen.
- Na het wijzigen van de instellingen kan u deze opslaan door op de knop *Opslaan* te drukken. Bij het opnieuw opstarten zal de Accu-Chek Smart Pix werken met de nieuwe instellingen.


4



### Grafieken en rapporten

- In het menu aan de linkerkant kunt u kiezen uit verschillende grafieken en overzichten.
- Klik op de optie *Rapportage samenstellen* bovenaan het scherm om een rapport te maken van één of meerdere grafieken en overzichten. Selecteer de gewenste rapporten.
- Klik vervolgens op *Rapport samenstellen* onderaan uw scherm. De Accu-Chek Smart Pix opent nu een nieuw venster met de gekozen grafieken. Deze kunnen vervolgens afgedrukt worden.

5

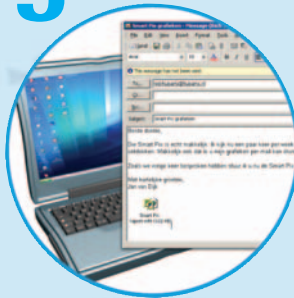

### Rapporten opslaan en versturen

- U kunt de rapporten en grafieken van de Accu-Chek Smart Pix opslaan of versturen via e-mail.
- Kijk voor meer informatie op de keerzijde van deze stap-vóór-stap kaart.



Roche

ACCU-CHEK<sup>®</sup>

Leven. Zoals ik het wil.

# ACCU-CHEK® *Smart Pix*

## Veel gestelde vragen

### Welke bloedglucosemeters en insulinepompen werken met de Accu-Chek Smart Pix?

- Accu-Chek Aviva
- Accu-Chek Compact Plus
- Accu-Chek Compact
- Accu-Chek Sensor (met Accu-Chek IR-key)
- Accu-Chek Comfort (met Accu-Chek IR-key)
  
- Accu-Chek Spirit
- Accu-Chek D-TRONplus
- D-TRONplus

### Hoe kan ik mijn Accu-Chek Smart Pix rapporten versturen via e-mail?

- Indien u slechts één rapport via e-mail wenst door te sturen, dient u eerst het gekozen rapport op de harde schijf van uw PC te bewaren. Hiervoor selecteert u in de menubalk\* de optie *Bestand* en vervolgens *Opslaan als*. Bewaar het rapport als *Webarchief (\*.mht)*. Vervolgens kan u het document.mht als bijlage toevoegen aan uw e-mail en versturen naar uw medische zorgverlener.
  
- Indien u alle rapporten via e-mail wenst door te sturen, dient u eerst het bestand "REPORT" dat zich onder de driver Accu-Chek Smart Pix (bijvoorbeeld E:\) bevindt, te kopiëren en vervolgens bewaren op de harde schijf van uw PC. Comprimeer nadien het bestand naar een REPORT.zip bestand. Het REPORT.zip bestand kan u dan als bijlage toevoegen aan uw e-mail en versturen naar uw medische zorgverlener.

\* Menustructuur en opties kunnen afwijken in andere browsers dan Microsoft® Internet Explorer


### Heb ik extra software of kabels nodig om met de Accu-Chek Smart Pix te kunnen werken?

Nee, om met de Accu-Chek Smart Pix te kunnen werken zijn geen extra software of kabels nodig.

### Hoe kan ik de gegevens opgeslagen in mijn Accu-Chek bloedglucosemeter of insulinepomp overbrengen naar de Accu-Chek Smart Pix?


#### ACCU-CHEK® Aviva

Zorg dat de meter is uitgeschakeld. Hou de 2 pijltjestoetsen gelijktijdig ingedrukt tot u op het display 2 pijlen afwisselend ziet knipperen. De gegevens worden nu verstuurd.

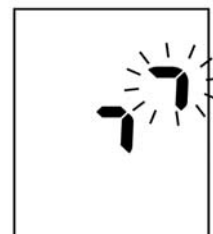

#### ACCU-CHEK® Compact Plus

Zorg dat de meter is uitgeschakeld. Hou de S- en M-toets gelijktijdig ingedrukt tot u op het display 2 pijlen afwisselend ziet knipperen. De gegevens worden nu verstuurd.

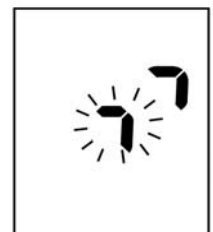

#### ACCU-CHEK® Spirit

Zorg dat de pomp in de STOP-stand staat. Druk herhaaldelijk op de Menu-toets om naar het communicatiemenu te gaan en selecteer met de Vink-toets. Het scherm datatransmissie geeft aan dat gegevens nu verstuurd worden. Druk na voltooiing op de Vink-toets om terug te gaan naar de STOP-stand.



#### ACCU-CHEK® D-TRONplus

Zorg dat de pomp in de STOP-stand staat. Druk 4x op de Menu-toets en bevestig de overdracht met de Vink-toets. Druk na voltooiing op de Vink-toets om terug te gaan naar de STOP-stand.

